

PHAGO'SURF ND

Desinfiioiva puhdistusaine

Käyttötarkoitus

- Desinfiioiva puhdistusaine pintojen ennaltaehkäisevään päivittäiseen desinfiointiin ja puhdistamiseen

Ominaisuudet

- laajakirjoinen desinfiointiaine; tappaa bakteereita, viruksia ja sieniä
- sopii hyvin monenlaisille materiaaleille
- ilmoitettu VAH-luettelo

Käyttöohjeet

Phago'surf ND pitää laimentaa (1-prosenttinen liuos). Huuhdellaan tarvittaessa. Kuivuu nopeasti.

Altistusaika: 15 minuuttia (VAH)

Koostumus

Vaikuttavat aineet:

didekyyli-dimetyyli-ammonium-kloridi (CAS 7171-51-5): 3,5 painoprosenttia

N-(3-aminopropyli)-N dodekyylipropaani-1,3-diamiini (CAS 2372-82-9):

5,5 painoprosenttia

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: kirkas neste

Väri: väritön tai vaaleankeltainen

Tuoksu: greippi

Tiheys (20 °C): 1,052 g/ml

pH-arvo (100 %): 9,1

Turvallisuus ja kuljetusohjeet

Vaarallinen

UN 3267

Säilytys

Käyttö yli 5 °C:n lämpötilassa. Säilytys mieluiten yli 0 °C:n lämpötilassa.

Kesto aika: 3 vuotta

Pakkaukset

Kanisteri 5 l

Antimikrobinen vaikutus

Standardi	Pitoisuus	Aika
BAKTEEREITA TAPPAVA		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> ja <i>S. aureus</i>)	0,25 %	5 min
EN 1276 likaiset olosuhteet (<i>P. aeruginosa</i> ja <i>S. aureus</i>)	0,25 %	5 min
EN 13697 likaiset olosuhteet (<i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> ja <i>E. hirae</i>)	0,25 %	15 min
MYKOBAKTEEREITA TAPPAVA		
Tehoaa Mycobacterium tuberculosis -bakteereihin (<i>M. tuberculosis hominis</i>)	0,25 %	15 min
SIENIÄ TAPPAVA		
EN 1275 (<i>C. albicans</i>)	0,125 %	5 min
EN 13697 likaiset olosuhteet (<i>C. albicans</i>)	0,25 %	15 min
VIRUKSIA TAPPAVA		
Tehoaa HI-virukseen (HIV)	0,25 %	15 min
Tehoaa HB-virukseen (HBV)	0,25 %	1 min

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.